

Poporodowa buteleczka Lansinoh® Post-Birth do podmywania 360ml

Zapewnia wygodną higienę okolic intymnych po porodzie. Umożliwia obmywanie krocza podczas korzystania z toalety. Dzięki specjalnie zaprojektowanej butelce z szyjką strumień wody zostaje uwolniony w idealny sposób pod pożądanym kątem.

Sposób użycia:

- Napełnić buteleczkę ciepłą wodą i zakręcić pokrywkę.
- Pozostając w pozycji siedzącej odwrócić butelkę do góry dnem kierując czubek dyszy w stronę krocza.
- Delikatnie ścisnąć buteleczkę i powtarzać czynność w zależności od potrzeb.

Wyłączny dystrybutor: **SensiMed**, ul. Jaworowa 84,05-830 Nadarzyn.
www.lansinoh.pl